



# ПАСПОРТ

## РОСТОМЕРЫ

Рм -1-«Диакомс», Рм- 2-«Диакомс»

АУКС.942819.034 ПС

Зав. № 49194

Регистрационный номер средства измерения  
№28682-10

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Ростомеры предназначены для измерения роста человека. Рм-1 позволяет измерять рост стоя. Рм-2 имеет откидное сиденье для измерения сидя. Ростомеры состоят из основания и стойки с ползуном.
- 1.2 Изменение роста производится механическим перемещением ползуна по стойки со шкалами ростомера до соприкосновения ползуна с верхней точкой головы.

### 1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шифр изделия	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Измеряемый рост мм	Масса изделия, кг
Рм-1	2150	400	400	2000 *	7,0
Рм-2	2150	400	400	2000 *	9,0

\*Погрешность измерения роста - не более 5 мм

### 3. ПОВЕРКА

- 3.1. Проверка ростомеров проводится в соответствии с методикой поверки «Ростомер медицинский Рм - «Диакомс». Методика поверки ( предоставляется по запросу).
- 3.2. Межповерочный интервал – 1 год.

### 4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Ростомер не требует специального обслуживания.
- 4.2. При транспортировании Рм-1 и Рм-2 допускается вертикальную стойку не устанавливать.

### 5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

- 5.1. Ростомеры Рм-1, Рм-2 должны соответствовать ТУ9452-034-17099103-2003
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия.
- 5.3. Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание при истечении срока гарантии или при наличии механических повреждений наружных частей изделия.
- 5.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.
- 5.5. Гарантийное обслуживание осуществляется по адресу фирмы.

Дата выпуска

19 ДЕК 2014

« ДИАКОМС  
ОТК - 1

Штамп производителя

Дата продажи

Штамп организации, продавшей изделие

ООО « ДИАКОМС »