



medi

Инструкция по применению и уходу за изделием

medi. Почувствуйте себя лучше.



1



2



3

medi CTS

Назначение

medi CTS — это Шина для запястья и пальцев кисти. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения запястья сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

Показания

- Консервативная терапия и постоперативное лечение карпального туннельного синдрома (CTS)
- Иммобилизация запястья и пальцев

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены

Рекомендации по надеванию

- Ладонная часть шины изогнута с учетом анатомии кисти. При необходимости изгиб шины можно моделировать по руке пациента. По возможности убедитесь в отсутствии промежутка между изделием, предплечьем и кистью. Пальцы должны поддерживаться в физиологически выгодном положении (рис.1).
- Загните боковые части шины на предплечье, в области запястья и на кончиках пальцев (рис.2).
- Застегните ленты (рис. 3).

Рекомендации по применению

Только постоянное использование medi CTS способствует эффективному лечению.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Алюминий, полиамид

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!