

## Инструкция по сборке и эксплуатации


### Кушетка смотровая

#### Модель M111-034

Изделие изготовлено в соответствии с


ТУ 9452-001-16789225-2016

Рег. удостоверение № РЗН 2017/5521 от 22.03.2017

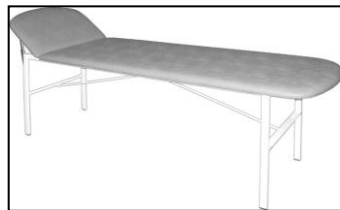

#### Комплектность поставки

- 1 – Лежак – 1 шт.
- 2 – Подголовник – 1 шт.
- 3 – Опора – 2 шт. (задняя, передняя)
- 4 – Стяжка малая – 1 шт.
- 5 – Стяжка большая – 1 шт.
- 6 – Профиль – 2 шт. (профиль 30x15, длина 1470 мм)
- 7 – Кронштейн телескопический – 1 шт.

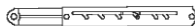

#### Крепежные изделия

- 8 – Винт мебельный М6х50 – 6 шт.
- 9 – Винт мебельный М6х30 – 6 шт.
- 10 – Винт мебельный М6х25 – 2 шт.
- 11 – Шайба 8 – 8 шт.
- 12 – Гайка М8 – 2 шт.
- 13 – “Г”-образный ключ – 1 шт.

#### Дополнительная комплектация (инструкция прилагается отдельно)

- 14 – Полотенцедержатель – 1 шт.
- 15 – Ящик – 1 шт.

### Инструкция по сборке

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. Прикрепить один из профилей (6) к лежаку (1) с помощью винтов мебельных М6х50 (8). Сориентировать профиль относительно лежака по схеме № 1. При этом несквозное отверстие профиля должно быть обращено вовнутрь лежака. В сквозное отверстие профиля вставить пруток подголовника. Соединить таким же образом второй профиль с подголовником, после чего прикрепить профиль к лежаку при помощи винтов М6х50 (8).



Схема № 1

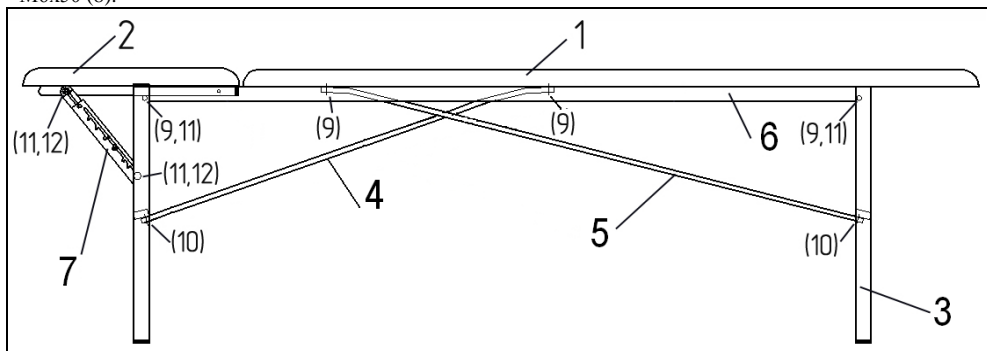


Схема № 2

3. Выбрать из двух опор (3) ту, которая имеет приваренный болт. Опору расположить со стороны подголовника так, чтобы болт опоры и болт подголовника были направлены в одну сторону. Прикрепить опору к профилям (6) при помощи двух винтов мебельных М6х30 (9), подложив под шляпки винтов шайбы 8 (11).
4. Прикрепить с помощью двух винтов мебельных М6х30 (9) и двух шайб 8 (11) вторую опору (3) к профилям (6) через боковые отверстия профилей.
5. Прикрепить стяжки (4,5): использовать винты М6х30 (9) для крепления к лежаку (1) и винты М6х25 (10) для крепления к опорам (3). Малую стяжку крепить со стороны подголовника!
6. Кронштейн телескопический (7) прикрепить к приваренным болтам подголовника (2) и опоры (3) с помощью гаек М8 (12), подложив по обе стороны кронштейна шайбы М8 (11). Расположить кронштейн лицевой стороной наружу, выдвинутой частью к подголовнику.

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45-70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за кожнозащитным средством

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щетки с мягким ворсом.
  2. Кожзащитное средство не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
  3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожу.
  4. Время от времени кожу следует протирать влажной тканью или губкой.
  5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
  6. Кожа не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на нее солнечных лучей.
  7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожу светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б