

**СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
СММП-08-«Я-ФП»**

Исполнения:

СММП-08-«Я-ФП»-01;

СММП-08-«Я-ФП»-02;

СММП-08-«Я-ФП»-03.

Паспорт

(техническое описание, руководство по эксплуатации)

ФП 9452.008.05 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Введение	4
2. Назначение	4
3. Основные технические характеристики	4
4. Комплект поставки	5
5. Устройство	6
6. Подготовка и порядок работы, указание мер безопасности	6
7. Техническое обслуживание	7
8. Текущий ремонт	7
9. Сведения о рекламациях	7
10. Правила транспортирования и хранения	8
11. Утилизация	8
12. Гарантийные обязательства	9
13. Сведения о товарном знаке	9
14. Свидетельство о приемке	11
15. Свидетельство об упаковке	11
16. Свидетельство о консервации	11
Приложение	
Гарантийный талон №1	12
Гарантийный талон №2	12
Регистрационное удостоверение (копия).....	13
Приложения к регистрационному удостоверению (копии).....	14

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий паспорт является совмещенным документом с техническим описанием и руководством по эксплуатации.

1.1. Паспорт предназначен для ознакомления со столами медицинскими металлическими передвижными СММП-08-«Я-ФП» (исполнение СММП-08-«Я-ФП»-01; исполнение СММП-08-«Я-ФП»-02; исполнение СММП-08-«Я-ФП»-03), (далее по тексту – стол медицинский исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3), и устанавливает правила их эксплуатации (использования, технического обслуживания, текущего ремонта, транспортирования и хранения).

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Стол медицинский (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) предназначен для размещения медикаментов, медицинских инструментов, приспособлений и т.п. и доставки их в палаты, процедурные кабинеты и другие помещения в пределах больничного корпуса.

2.2. Стол медицинский (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) размещают в операционных, перевязочных, больничных палатах, смотровых, стоматологических кабинетах и других помещениях лечебных и лечебно-профилактических учреждений, где требуется работа с медикаментами, медицинскими инструментами и приспособлениями.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Габаритные размеры столов медицинских должны быть не более указанных в таблице 1.

Таблица 1

Наименование модели	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм.
Столы медицинские металлические передвижные исполнений:	
- СММП-08-«Я-ФП»-01	480х585х850
- СММП-08-«Я-ФП»-02	510х585х850
- СММП-08-«Я-ФП»-03	510х585х850

3.2. Масса столов медицинских должна быть не более, чем указано в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование модели	Масса, кг.
Столы медицинские металлические передвижные исполнений:	
- СММП-08-«Я-ФП»-01	20
- СММП-08-«Я-ФП»-02	35
- СММП-08-«Я-ФП»-03	25

3.3. Стол медицинский (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) должен выдерживать номинальную нагрузку, равномерно распределенную по полке из нержавеющей стали не менее 25 кг.

3.4. Стол медицинский (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) должен выдерживать номинальную нагрузку, равномерно распределенную по полке из стекла не менее 7 кг.

3.5. Усилие передвижения стола медицинского (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) по полу с номинальной нагрузкой не более 30Н.

3.6. Усилие, прилагаемое к выдвиганию ящиков стола медицинского (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) более 5Н.

3.7. Колеса стола медицинского (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

3.8. Наружные поверхности стола медицинского (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

3.9. Условия эксплуатации стола медицинского (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ Р 50444: температура от +10°C до +35°C; относительная влажность до 80 % при температуре +25°C.

3.10. Средний срок службы стола медицинского (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) не менее 5 лет.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Комплект поставки столов медицинских должен соответствовать таблице 3.

Таблица 3.

Наименование	Обозначение документа	Количество
1. Столы медицинские металлические передвижные (одного исполнения, одной модели):		
1.1 «СММП-08-«Я-ФП»-01 (одной модели) в составе:	ФП 9452.008.05- А	1
а) каркас	ФП 9452.008.05-01	1
б) полка (стекло)	ФП 9452.008.05-02	3*
в) полка (нержавеющая сталь)	ФП 9452.008.05-03	3*
г) полка (окрашенный металл)	ФП 9452.008.05-04	3*
д) корзина (гальванизированный металл)	ФП 9452.008.05-05	3*
е) столешница (нержавеющая сталь)	ФП 9452.008.05-07	1*
ж) столешница (окрашенный металл)	ФП 9452.008.05-08	1*
1.2 «СММП-08-«Я-ФП»-02 (одной модели) в составе:	ФП 9452.008.05- Б	1
а) каркас	ФП 9452.008.05-01	1
б) полка (стекло)	ФП 9452.008.05-02	1*
в) полка (нержавеющая сталь)	ФП 9452.008.05-03	1*
г) полка (окрашенный металл)	ФП 9452.008.05-04	1*
д) корзина (гальванизированный металл)	ФП 9452.008.05-05	1*
е) столешница (нержавеющая сталь)	ФП 9452.008.05-07	2*
ж) столешница (окрашенный металл)	ФП 9452.008.05-08	2*
з) ящик выдвижной	ФП 9452.008.05-09	4*
1.3 «СММП-08-«Я-ФП»-03 (одной модели) в составе:	ФП 9452.008.05- В	1
а) каркас	ФП 9452.008.05-01	1
б) полка (стекло)	ФП 9452.008.05-02	3*
в) полка (нержавеющая сталь)	ФП 9452.008.05-03	3*
г) полка (окрашенный металл)	ФП 9452.008.05-04	2*
д) корзина (гальванизированный металл)	ФП 9452.008.05-05	1*
е) столешница (нержавеющая сталь)	ФП 9452.008.05-07	2*
ж) столешница (окрашенный металл)	ФП 9452.008.05-08	2*
з) ящик выдвижной	ФП 9452.008.05-09	2*
Принадлежности		
2. Детали крепежные	ГОСТ 1759.0; ГОСТ 1147; ГОСТ 10618; ГОСТ 18123; ГОСТ 10304	*
3. Паспорт (Руководство по эксплуатации)	ФП 9452.008.05-ПС	1

Примечание: * - количество по требованию заказчик

5. УСТРОЙСТВО

5.1. Стол медицинский металлический передвижной СММП-08-«Я-ФП», исполнение СММП-08-«Я-ФП»-01, состоит из разборного каркаса, на котором крепежными соединениями закреплены полки, столешница и металлическая корзина. Исполнение полок - нержавеющая сталь, окрашенный металл или стекло, исполнение столешниц - нержавеющая сталь или окрашенный металл, исполнение корзины – гальванизированный металл.

Разборный каркас изготовлен из тонкостенного, стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам.

Стол медицинский снабжен четырьмя самоориентирующимися колесами. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Количество полок поставляется по требованию заказчика, но не более трех. Материал, из которого изготовлены полки (нержавеющая сталь, крашенный металл или стекло) выбирает заказчик.

Стол медицинский поставляется заказчику в разборном или собранном виде, в зависимости от выбранной модели.

5.2. Стол медицинский металлический передвижной СММП-08-«Я-ФП», исполнение СММП-08-«Я-ФП»-02 состоит из разборного каркаса, на котором крепежными соединениями закреплены выдвижные ящики, полки, столешница и корзина.

Разборный каркас изготовлен из тонкостенного, стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам.

Стол медицинский снабжен четырьмя самоориентирующимися колесами. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Количество выдвижных ящиков поставляется по требованию заказчика, но не более четырех.

Стол медицинский поставляется заказчику в разборном или собранном виде, в зависимости от выбранной модели.

5.3. Стол медицинский металлический передвижной СММП-08-«Я-ФП», исполнение СММП-08-«Я-ФП»-03 состоит из разборного каркаса, на котором крепежными соединениями закреплены выдвижные ящики, полки, столешница и корзина. Исполнение полок - нержавеющая сталь, окрашенный металл или стекло.

Разборный каркас изготовлен из тонкостенного, стального профиля с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам.

Стол медицинский снабжен четырьмя самоориентирующимися колесами. На двух колесах предусмотрен механизм стопора.

Количество полок поставляется по требованию заказчика, но не более трех. Материал, из которого изготовлены полки, выбирает заказчик.

Количество выдвижных ящиков поставляется по требованию заказчика, но не более двух.

Стол медицинский поставляется заказчику в разборном виде.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ, УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Извлечь стол медицинский (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) из транспортной тары. Законсервированные поверхности протереть марлевым тампоном, смоченным спиртом (обильное смачивание не рекомендуется).

6.2. Проверить комплектность стола медицинского (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3).

6.3. После транспортирования стола медицинского (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) в условиях отрицательных температур его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 24 часов.

6.4. Провести сборку и техническое обслуживание стола медицинского (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) согласно разделу № 7 настоящего паспорта.

6.5.Произвести дезинфекцию стола медицинского (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113. Поверхности стола обрабатывают дезинфицирующим средством (п. 3.8) в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

6.6.Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания стола, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится один раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колес любой консистентной технической смазкой, промывке моющими растворами и санитарной обработке столика.

7.2.Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования стола медицинского, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.

7.3.Критерием предельного состояния является состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима и нецелесообразна по условиям экономичности.

8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

8.1.Общие положения.

8.1.1.Текущий ремонт производится специалистами ремонтных предприятий или предприятия-изготовителя.

8.2.Содержание текущего ремонта

8.2.1. Текущий ремонт включает следующие этапы:

- 1) обнаружение неисправностей;
- 2) исправление неисправностей;
- 3) проверка работоспособности изделия после ремонта.

8.3.Обнаружение неисправностей

8.3.1.Обнаружение неисправностей производится в соответствии с разделом 7 (п. 7.2-7.3) настоящего паспорта.

8.4.Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.

8.5.После выполнения текущего ремонта проводится проверка технического состояния.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1.В случае отказа изделия или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приёмке владелец должен направить в адрес предприятия – изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия;
- дефектную ведомость;
- гарантийный талон.

9.2. Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице 4.

Таблица 4

Дата отказа или возникновение неисправностей	Количество наработанных часов до возникновения отказа или неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примечание

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

10.1. Стол медицинский (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80% при температуре окружающего воздуха +25°C.

10.2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

10.3. Перед длительным хранением металлические поверхности частей изделия без лакокрасочных покрытий обезжирить и законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения ВЗ-0, ВУ-4 для условий хранения по группе ОЖО4 по ГОСТ 15150-69.

Предельный срок защиты без переконсервации - 5 лет.

10.4. Запасные части, принадлежности и эксплуатационную документацию оберните двухслойной оберточной бумагой и заклейте клеевыми лентами, паспорт положите в чехол.

10.5. Стол медицинский (исполнение 1; исполнение 2; исполнение 3) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

10.6. Транспортирование и хранение изделия без упаковки завода изготовителя не гарантирует сохранность. Повреждения в результате транспортирования или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Утилизация столов осуществляется в порядке, предусмотренном СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» для отходов класса Б.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования установлен 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

12.2. В течение гарантийного срока изготовитель или предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет стол медицинский или его части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт и указанием адреса, где находится изделие, номера телефона. Также необходимо выслать сломанную деталь, если высылка затруднена, то об этом должно быть указано в ведомости.

Рекламации на стол медицинский и его части, подвергнутые ремонту у потребителя, заводом не удовлетворяются.

Адрес предприятия изготовителя: ООО «Ферропласт Медикал»

Юридический. адрес: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский

Фактический (почтовый) адрес: 150049, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17 А

Адрес производства: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, пос. Приволжский

Т/факс: (4852) 48-67-02; 58-45-61; 58-45-62; 58-45-63; 58-45-64; 97-93-90;

тел Сервис центра 8(9019) 94- 40-56 e-mail: [REDACTED]

13. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРНОМ ЗНАКЕ.

ЦИМПА-ЛАЙТ является товарным знаком, принадлежащим ООО «Ферропласт Медикал» и зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 03 августа 2011, № 442147.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столы медицинские металлические передвижные «СММП-08-«Я-ФП», ТУ 9452-008-55307168-2006, исполнение: «СММП-08-«Я-ФП» _____ модель _____

Заводской номер _____ соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации

Дата выпуска _____ (год, месяц, число) Начальник ОТК _____ Штамп ОТК _____

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Столы медицинские металлические передвижные «СММП-08-«Я-ФП», ТУ 9452-008-55307168-2006, исполнение: «СММП-08-«Я-ФП» _____ модель _____

Заводской номер _____ упакован _____
(наименование предприятия, производившего упаковку)
согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией

Дата упаковки _____

Упаковку произвёл _____ (подпись)

Изделие после упаковки принял _____ (подпись)

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Столы медицинские металлические передвижные «СММП-08-«Я-ФП», ТУ 9452-008-55307168-2006, исполнение: «СММП-08-«Я-ФП» _____ модель _____

Заводской номер _____ подвергнут _____
(наименование предприятия, производившего консервацию)
согласно требованиям, предусмотренным настоящим руководством.

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию произвёл _____ (подпись)

Изделие после консервации принял _____ (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
изделия медицинской техники

Столы медицинские металлические передвижные «СММП-08-«Я-ФП», ТУ 9452-008-55307168-2006, исполнение: «СММП-08-«Я-ФП» _____ модель _____

Номер и дата выпуска _____
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Города _____

М.П. Руководитель ремонтного предприятия _____ (подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
изделия медицинской техники

Столы медицинские металлические передвижные «СММП-08-«Я-ФП», ТУ 9452-008-55307168-2006, исполнение: «СММП-08-«Я-ФП» _____ модель _____

Номер и дата выпуска _____
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Города _____

М.П. Руководитель ремонтного предприятия _____ (подпись)