


МД SM 1

ПРОМЕТ **30** ЛЕТ

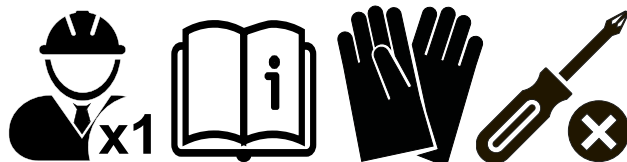





ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Столы процедурные и манипуляционные серии МД предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.

Столы процедурные и манипуляционные серии МД имеют сборно-разборную конструкцию, элементы которой (за исключением деталей из нержавеющей стали) устойчивы к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

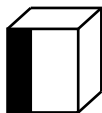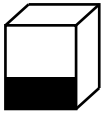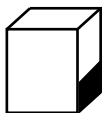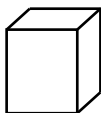
Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
МД SM 1	960	620	450	18







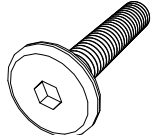
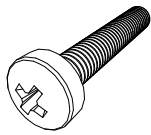

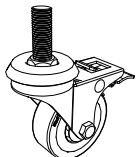
* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Дно ящика	1	7	Стенка боковая правая	1
2	Стенка задняя ящика	1	8	Стенка задняя	1
3	Стенка передняя ящика	1	9	Крыша	1
4	Комплект направляющих	1	10	Стойка стола	2
5	Дно	1	11	Полка	2
6	Стенка боковая левая	1	12	Комплект фкрнитуры	1

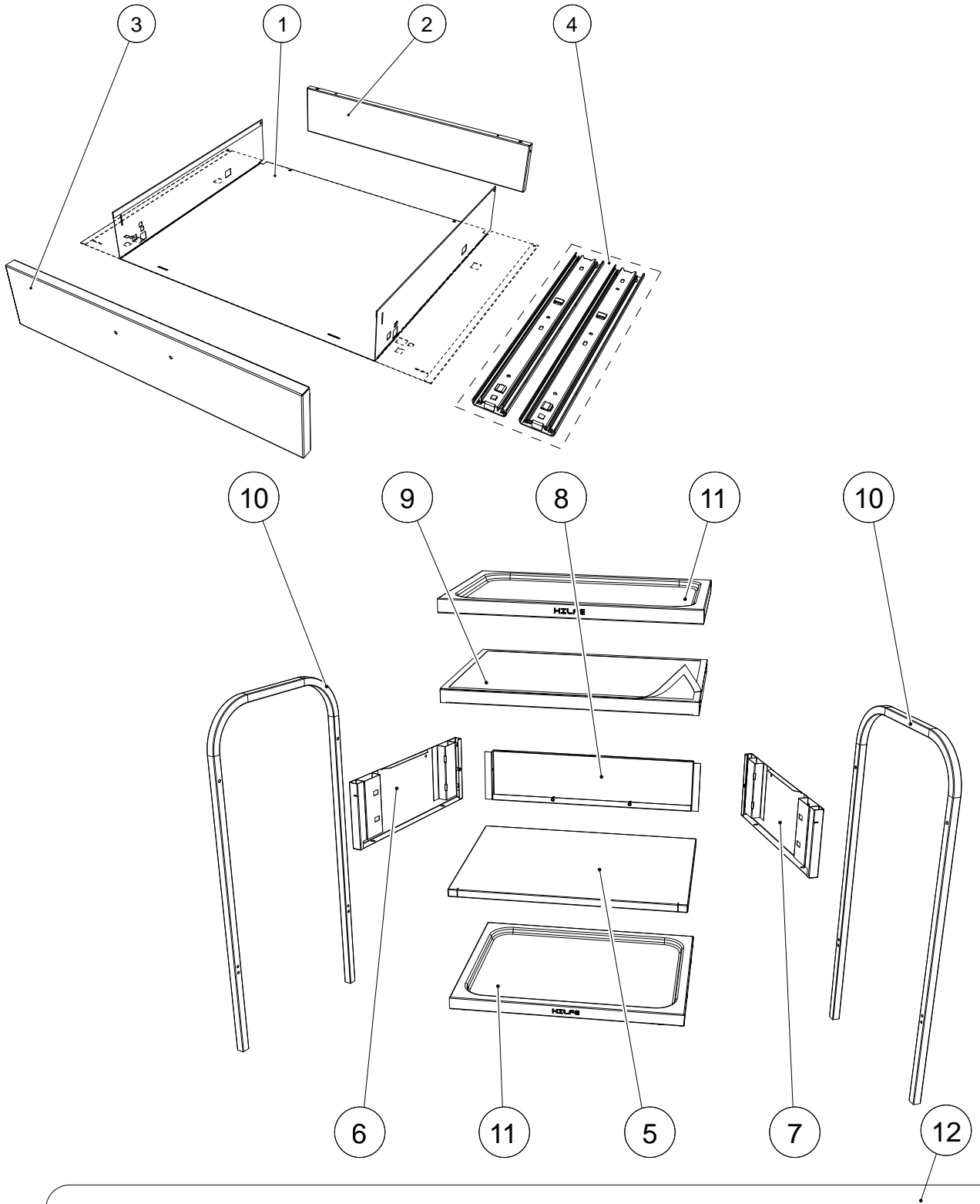4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

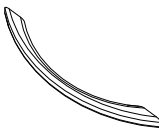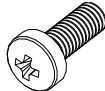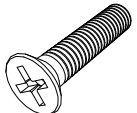


<p>4.2x13 DIN7981</p>  <p>4x</p>	<p>M4x5 DIN7985</p>  <p>2x</p>	<p>1x</p> 	<p>M5x12 DIN7985</p>  <p>4x</p>	<p>M5x20 DIN965</p>  <p>4x</p>
<p>1x</p> 	<p>M6x35 DIN7420</p>  <p>4x</p>	<p>M5x30 DIN7985</p>  <p>8x</p>	<p>2x</p> 	<p>2x</p> 


1

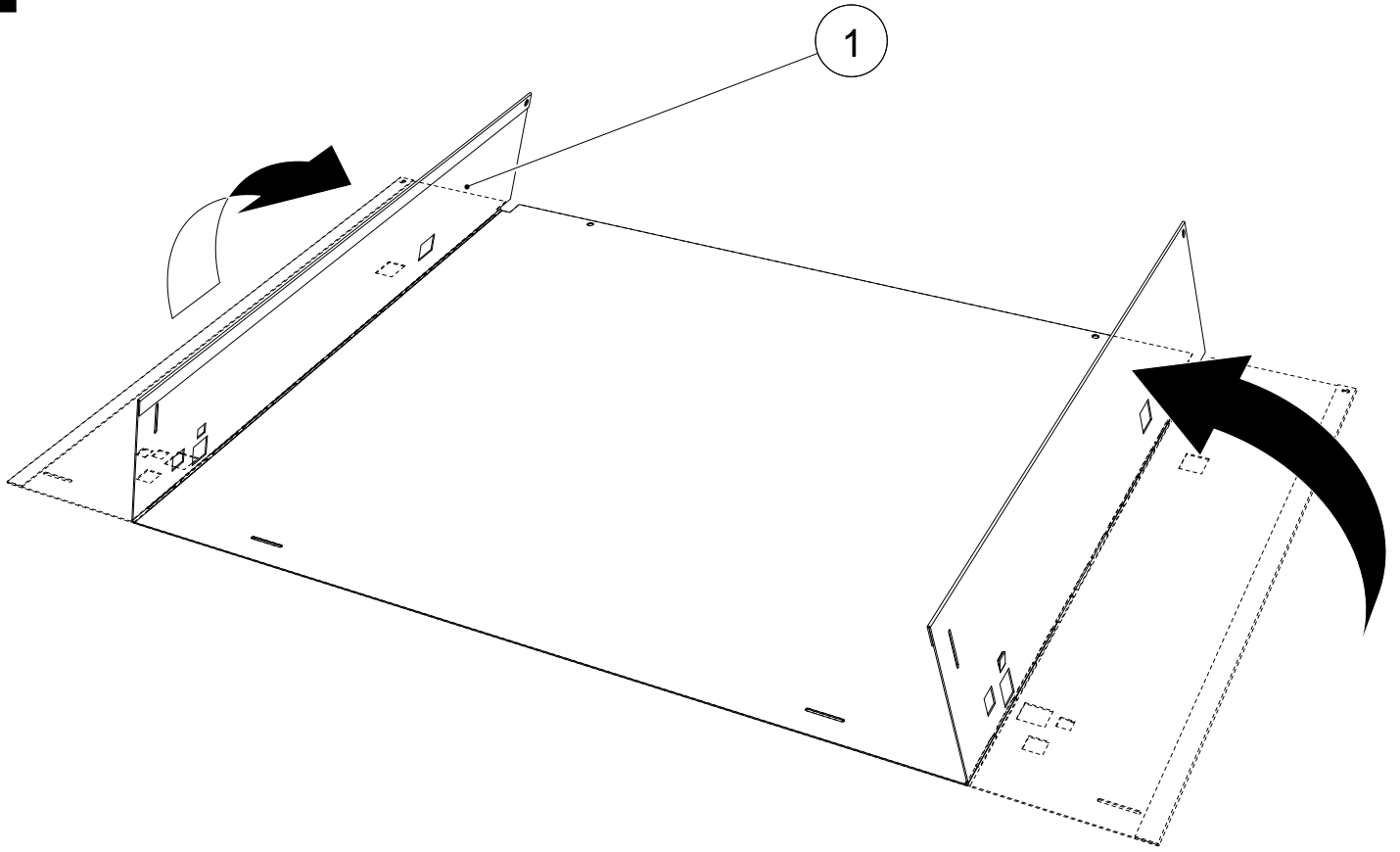


2

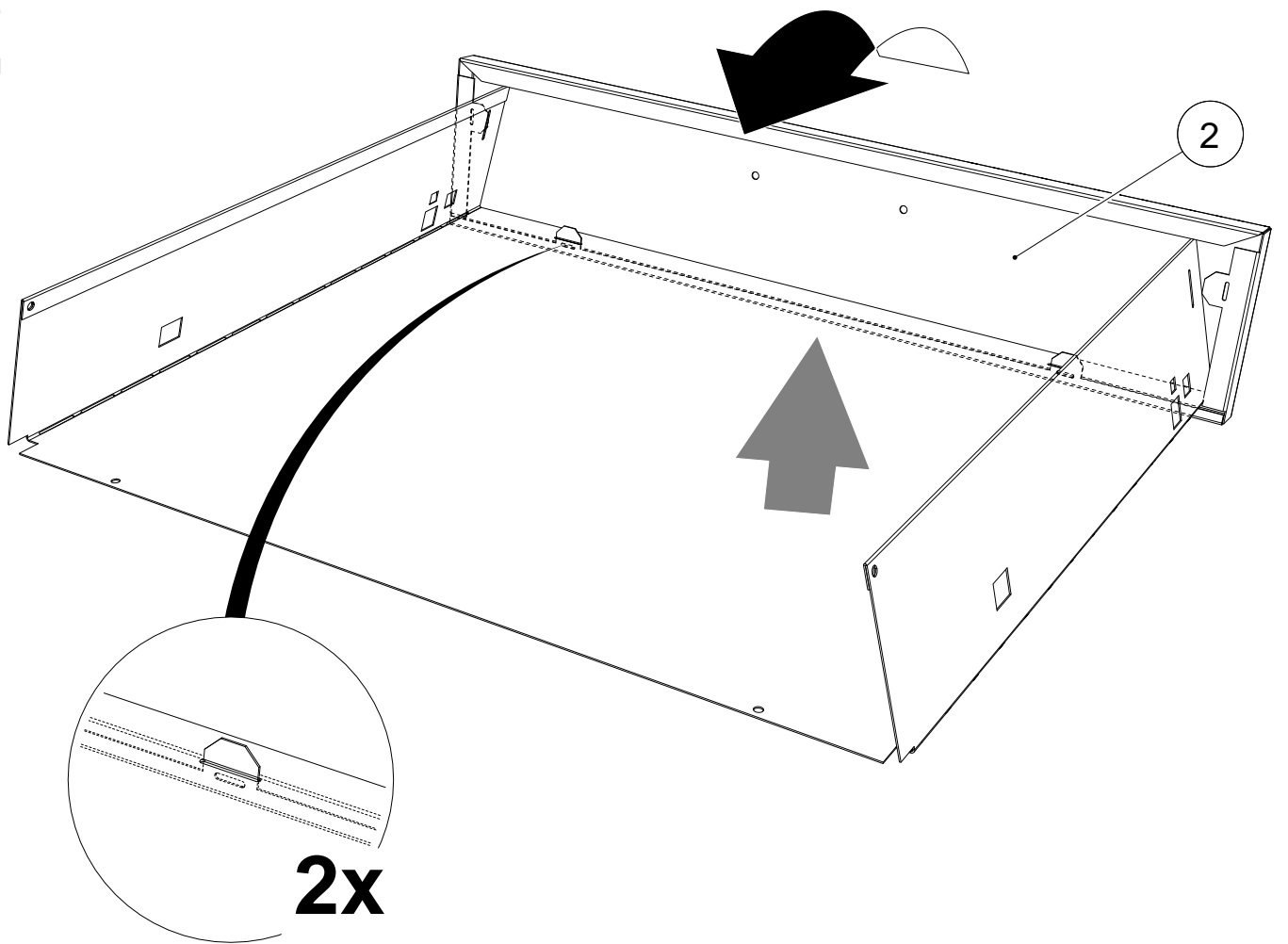


3

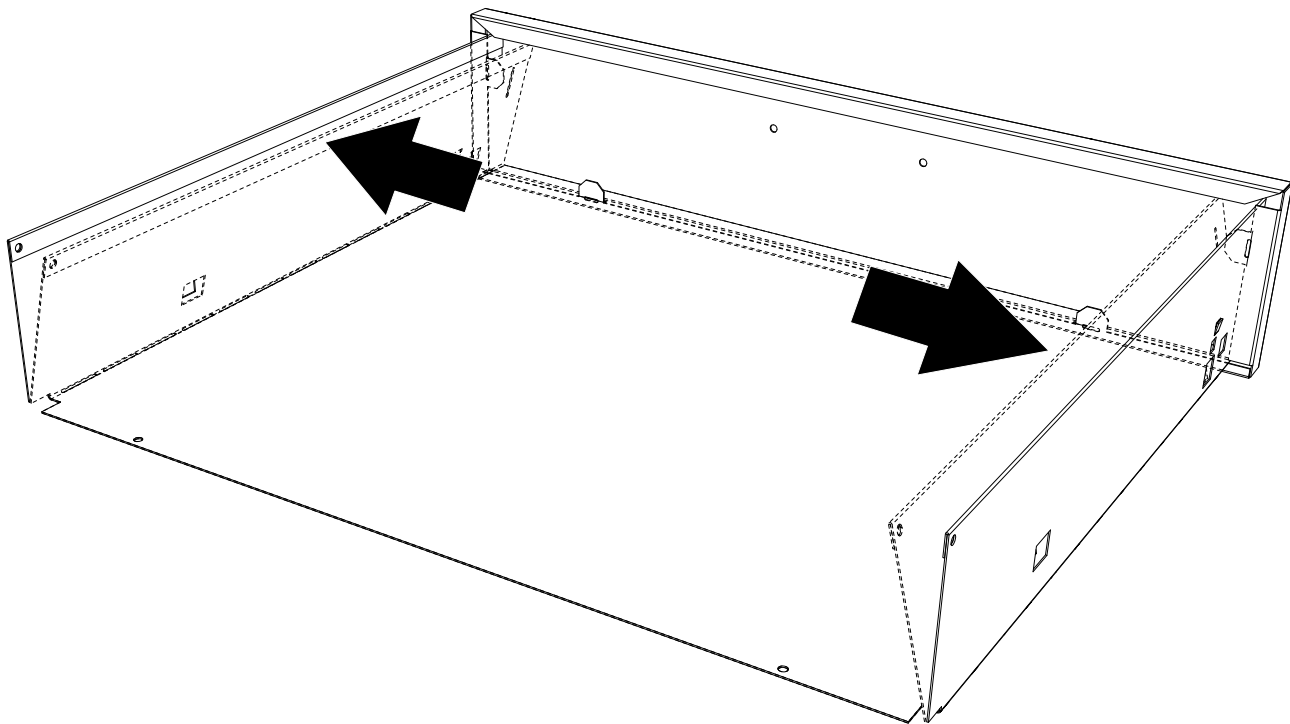


4

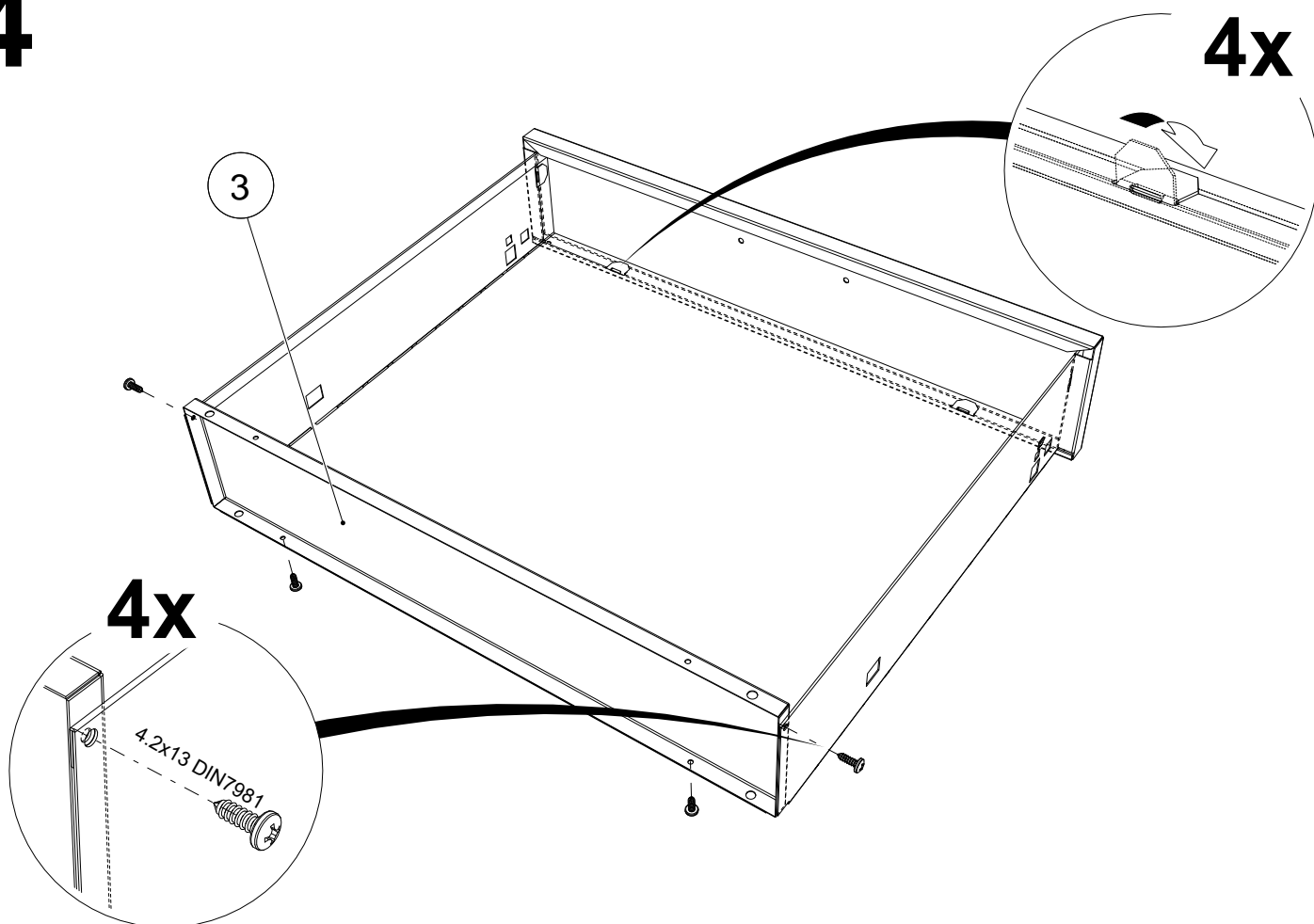


5

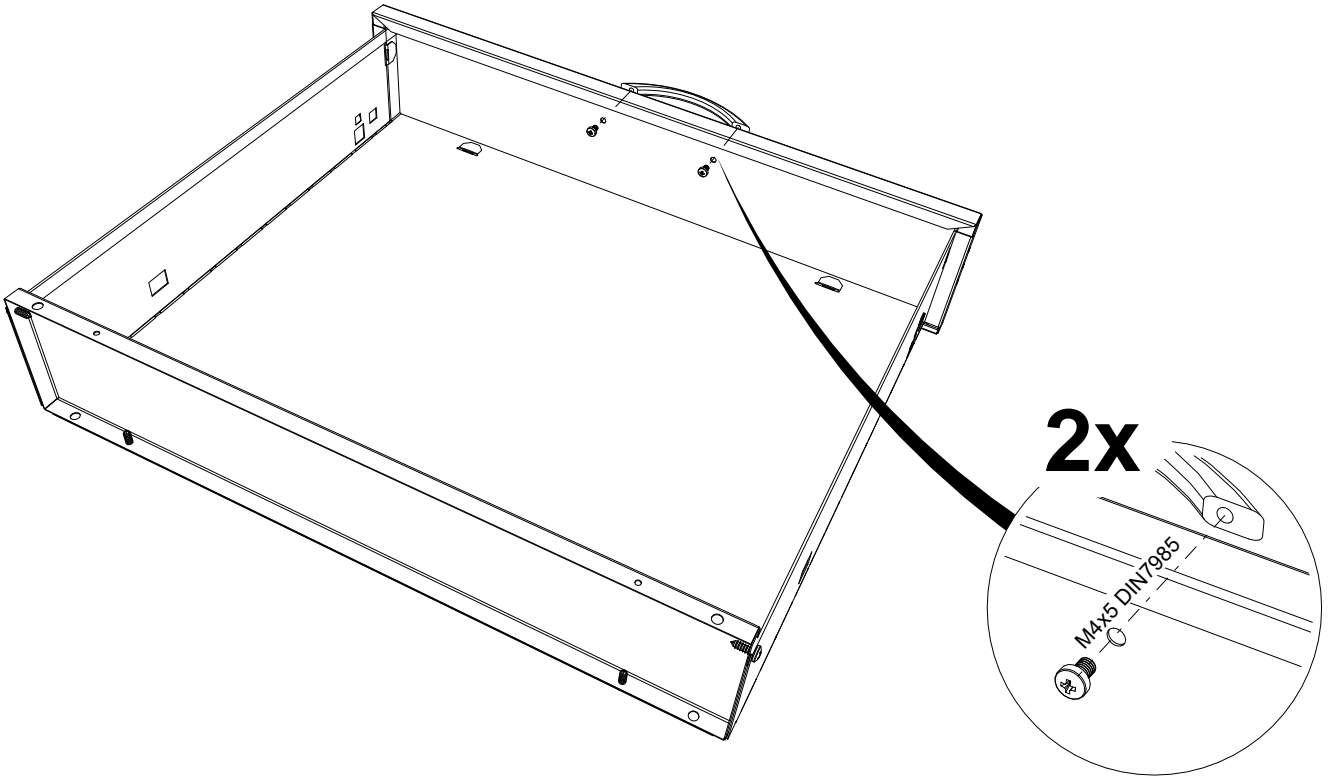


6

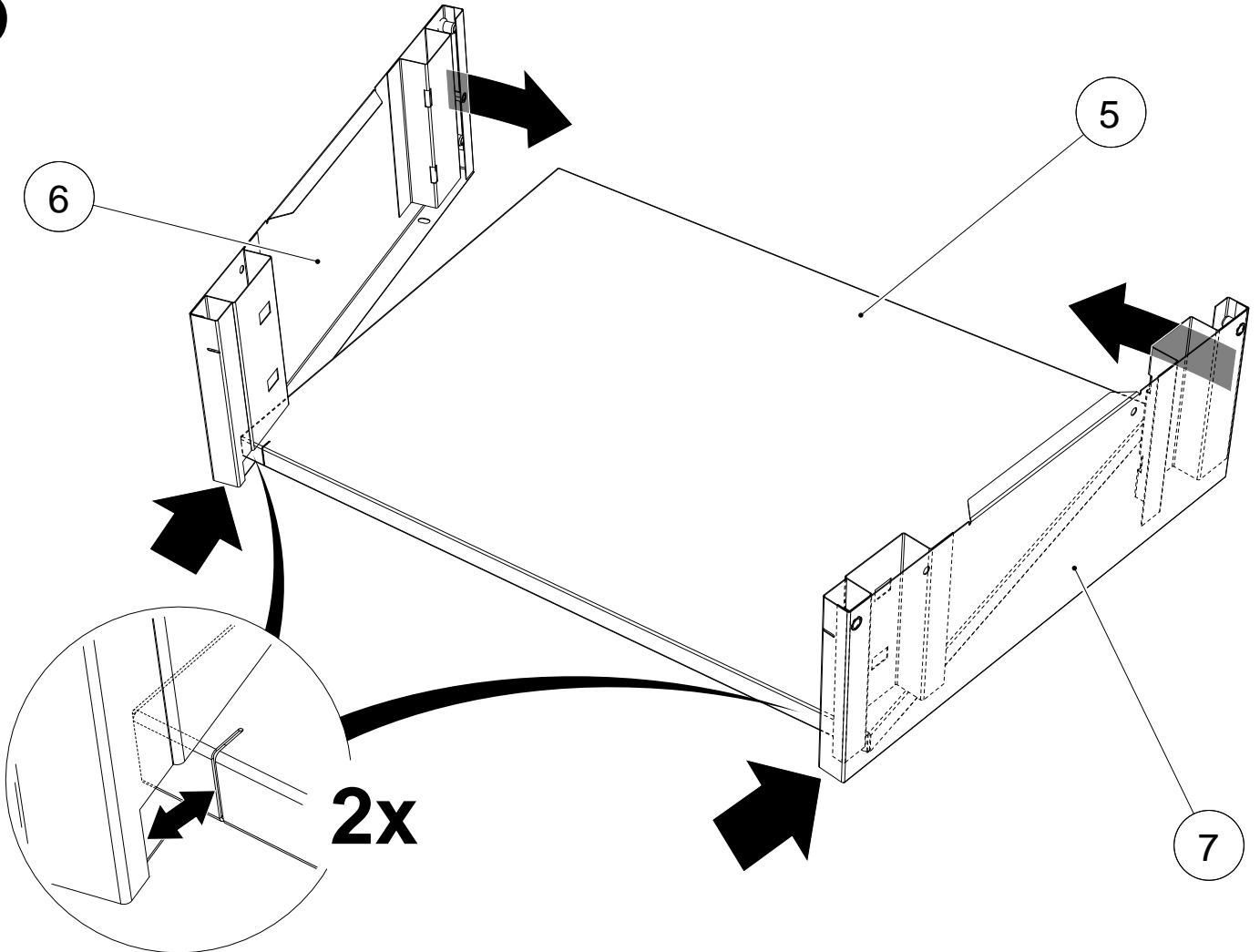


7

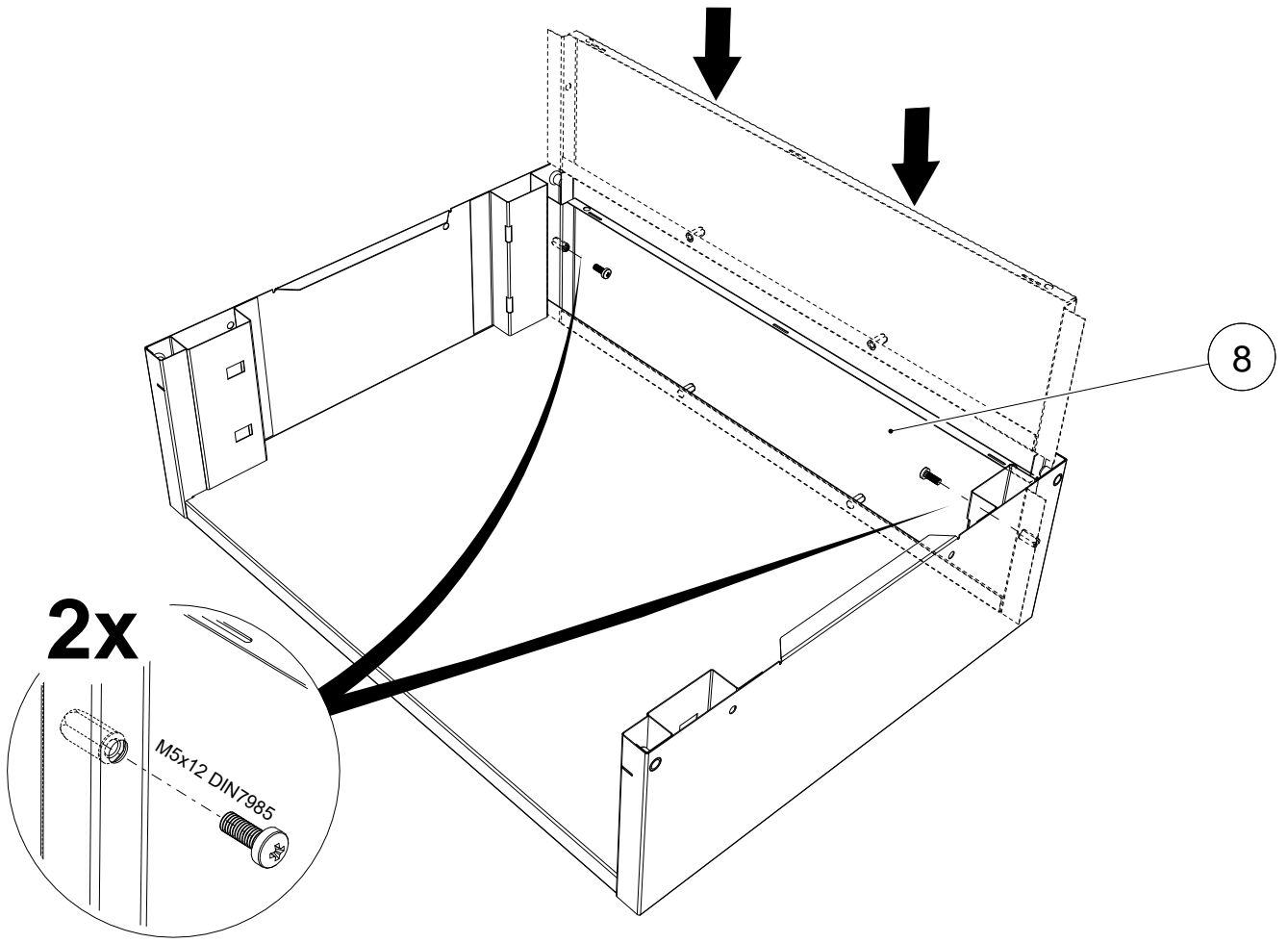


8

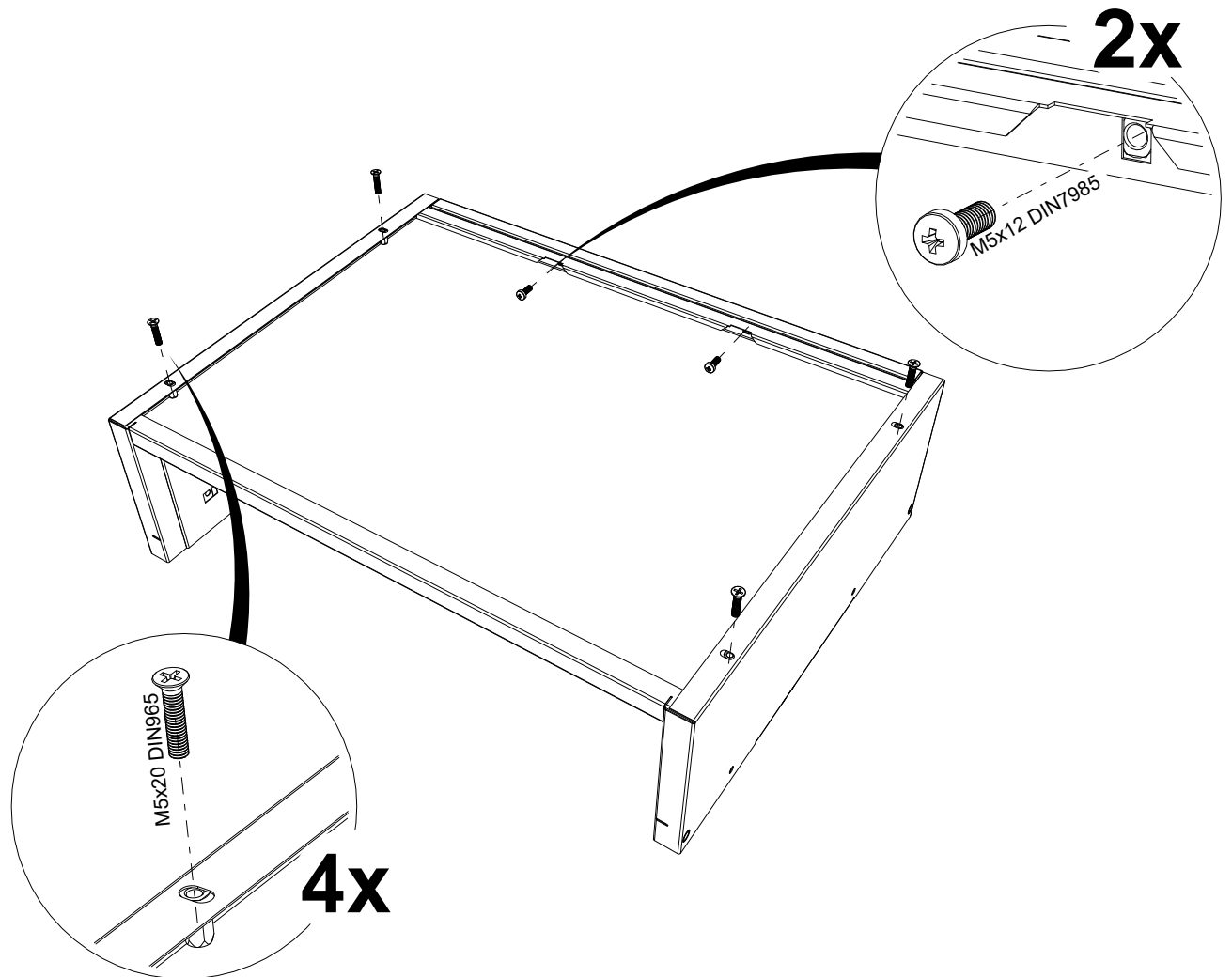


9

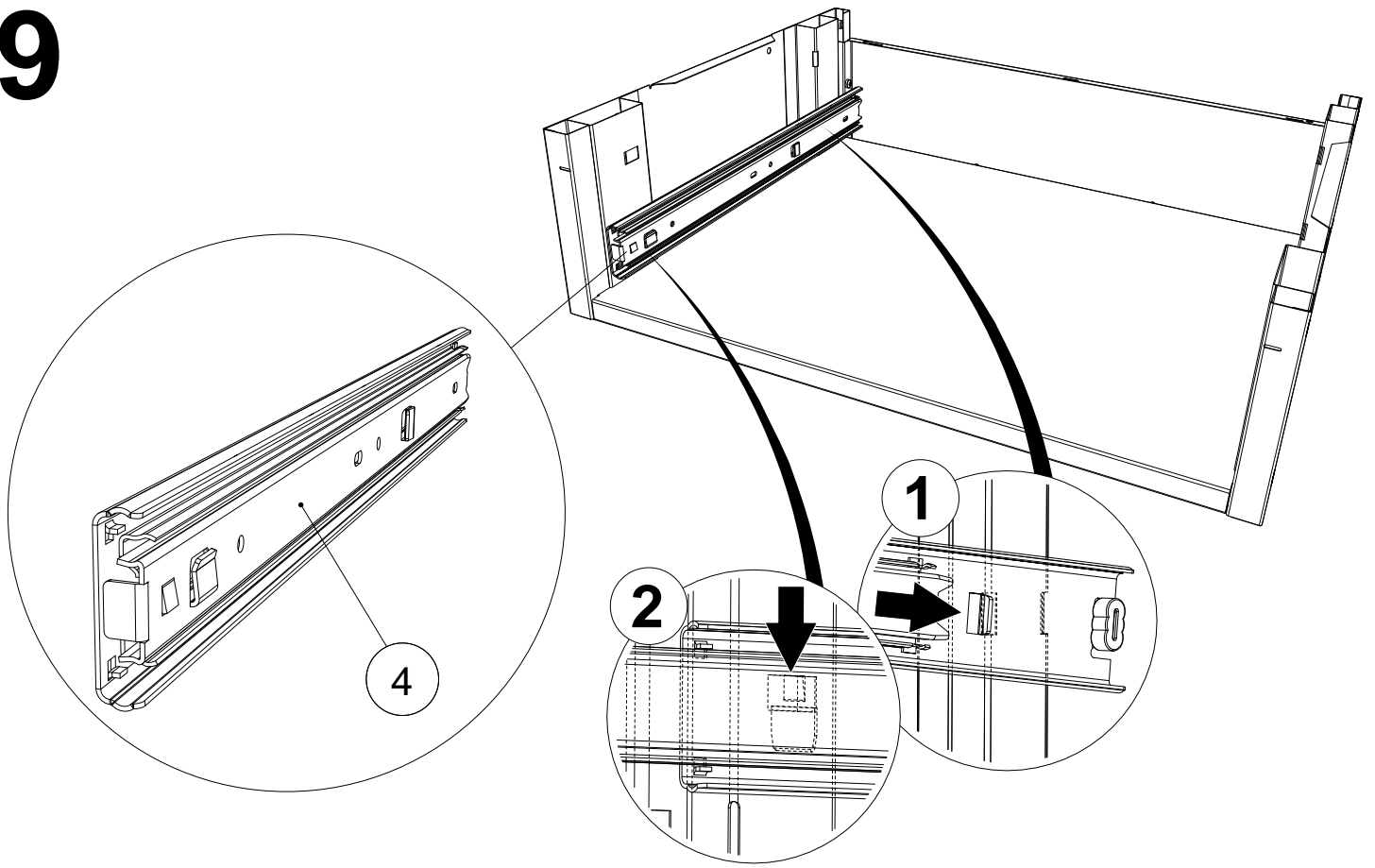


10

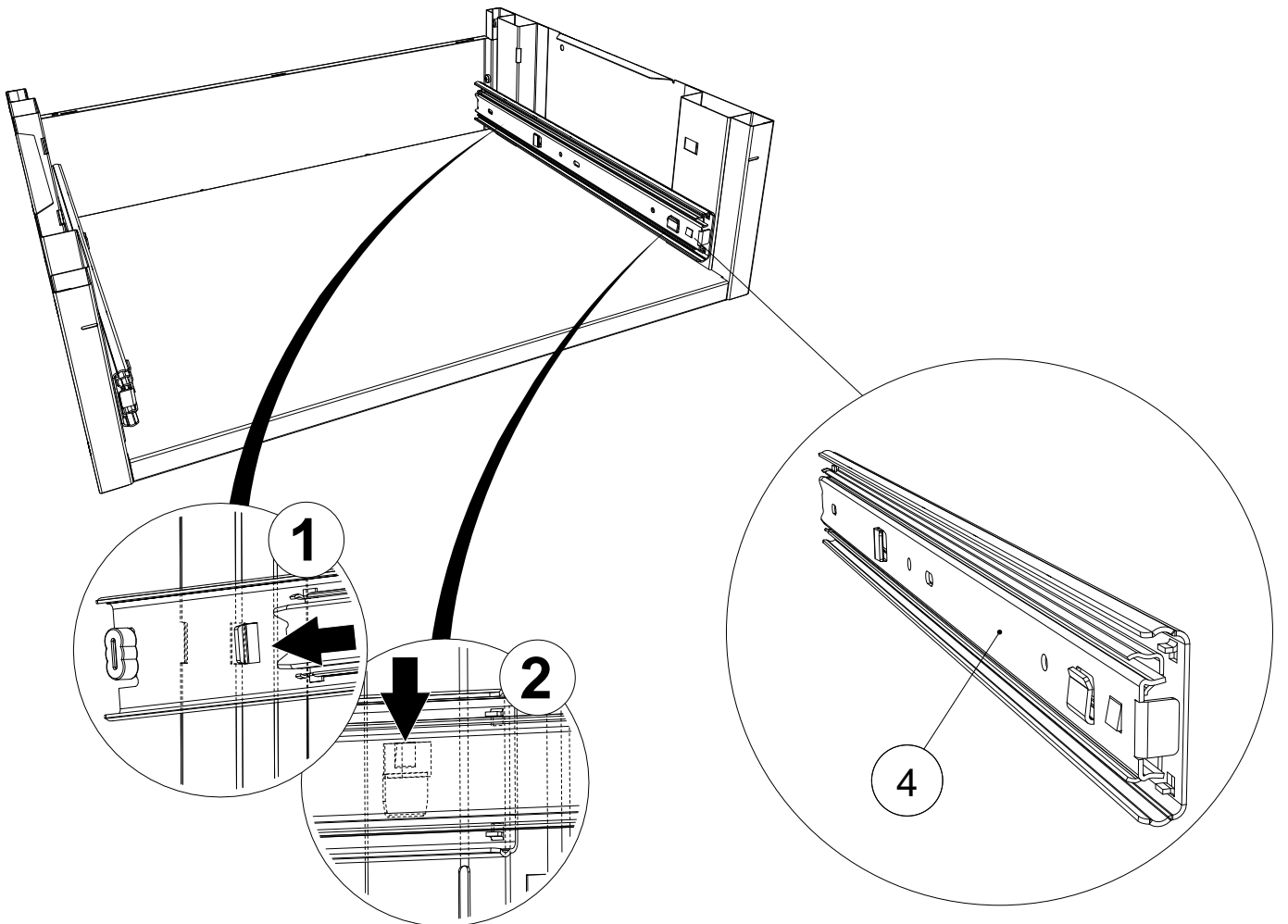


11

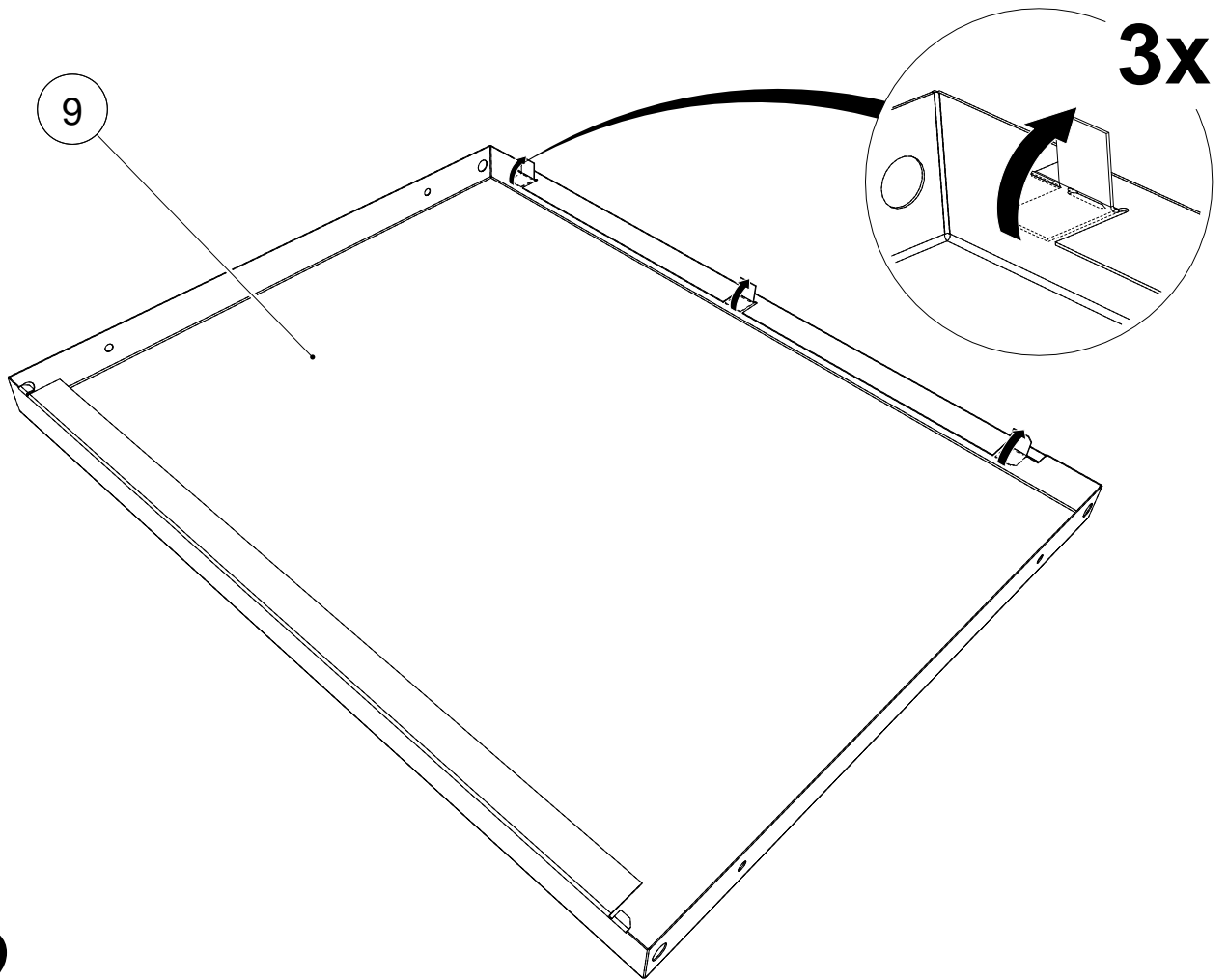


12

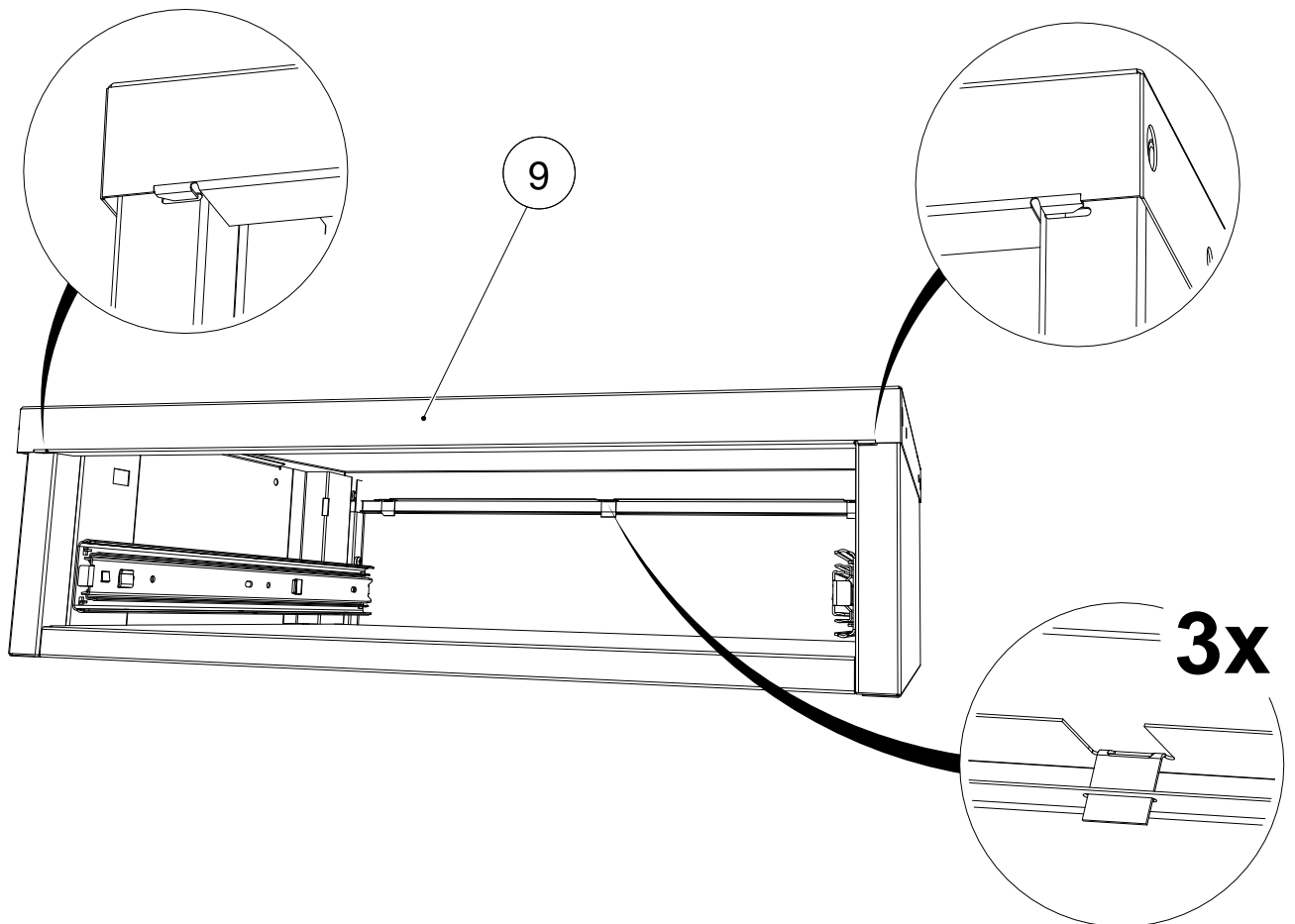


13

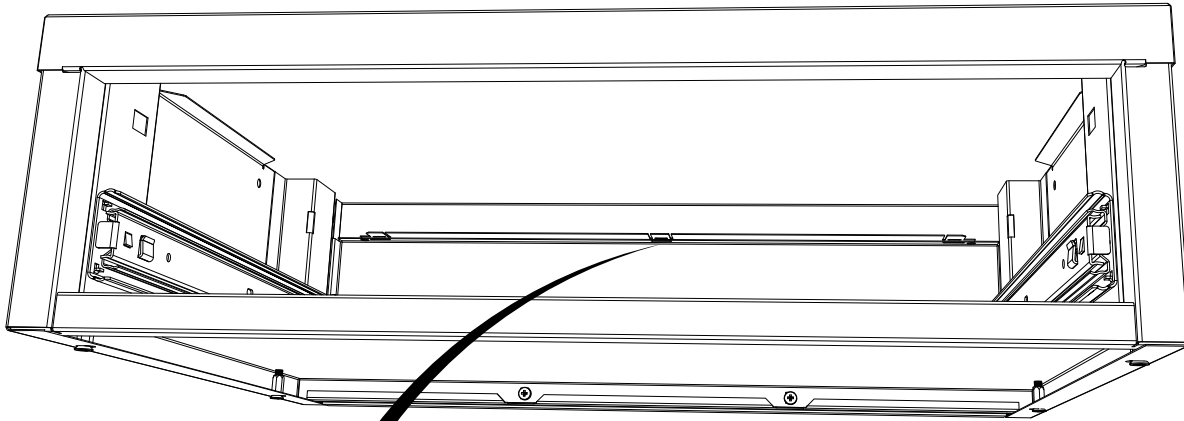


3x

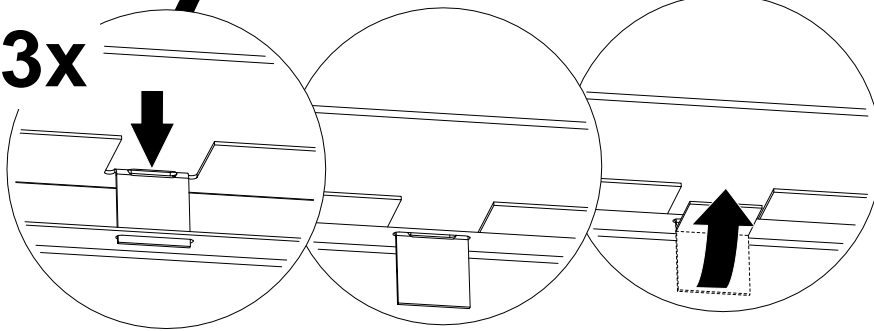


14

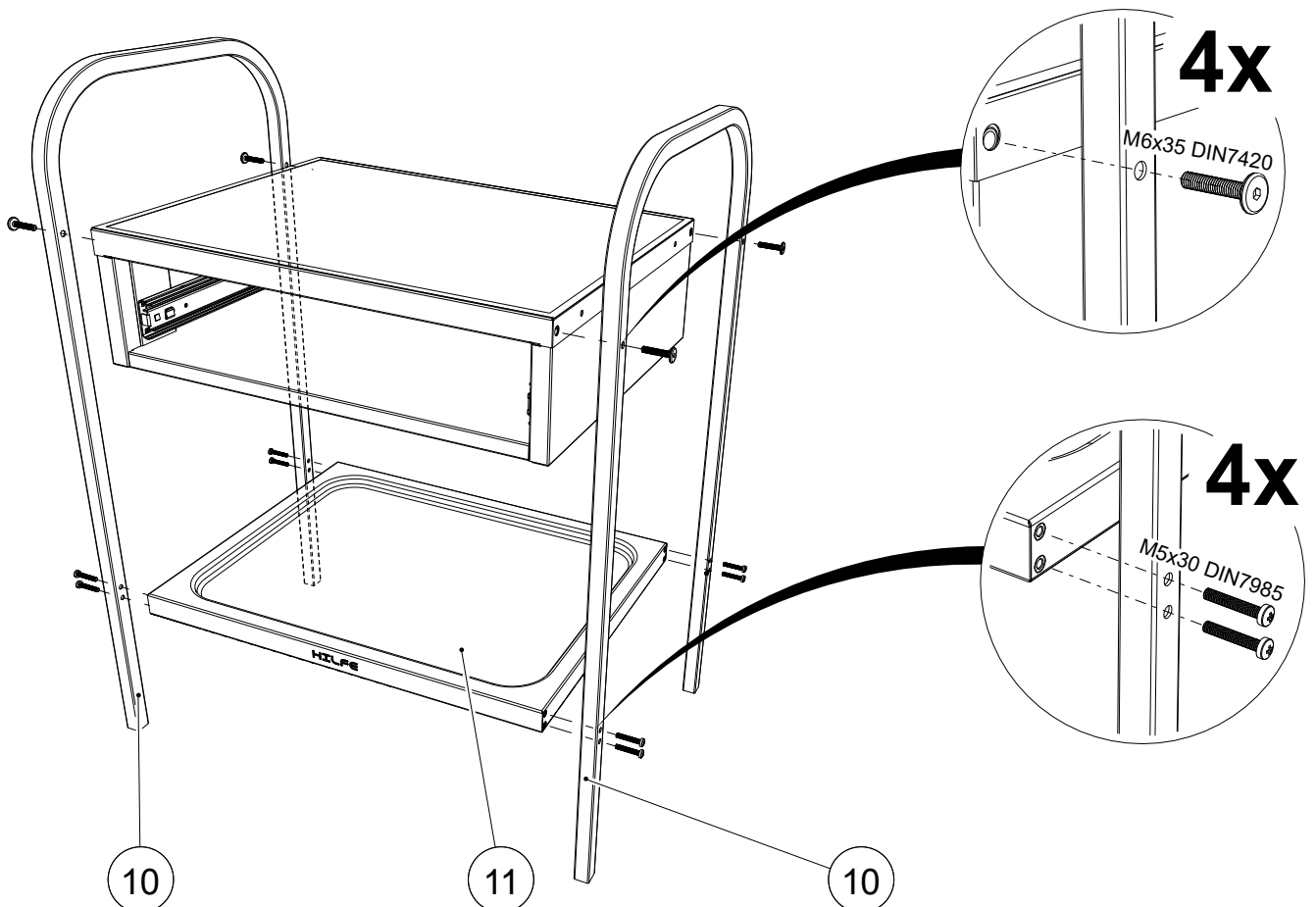


15

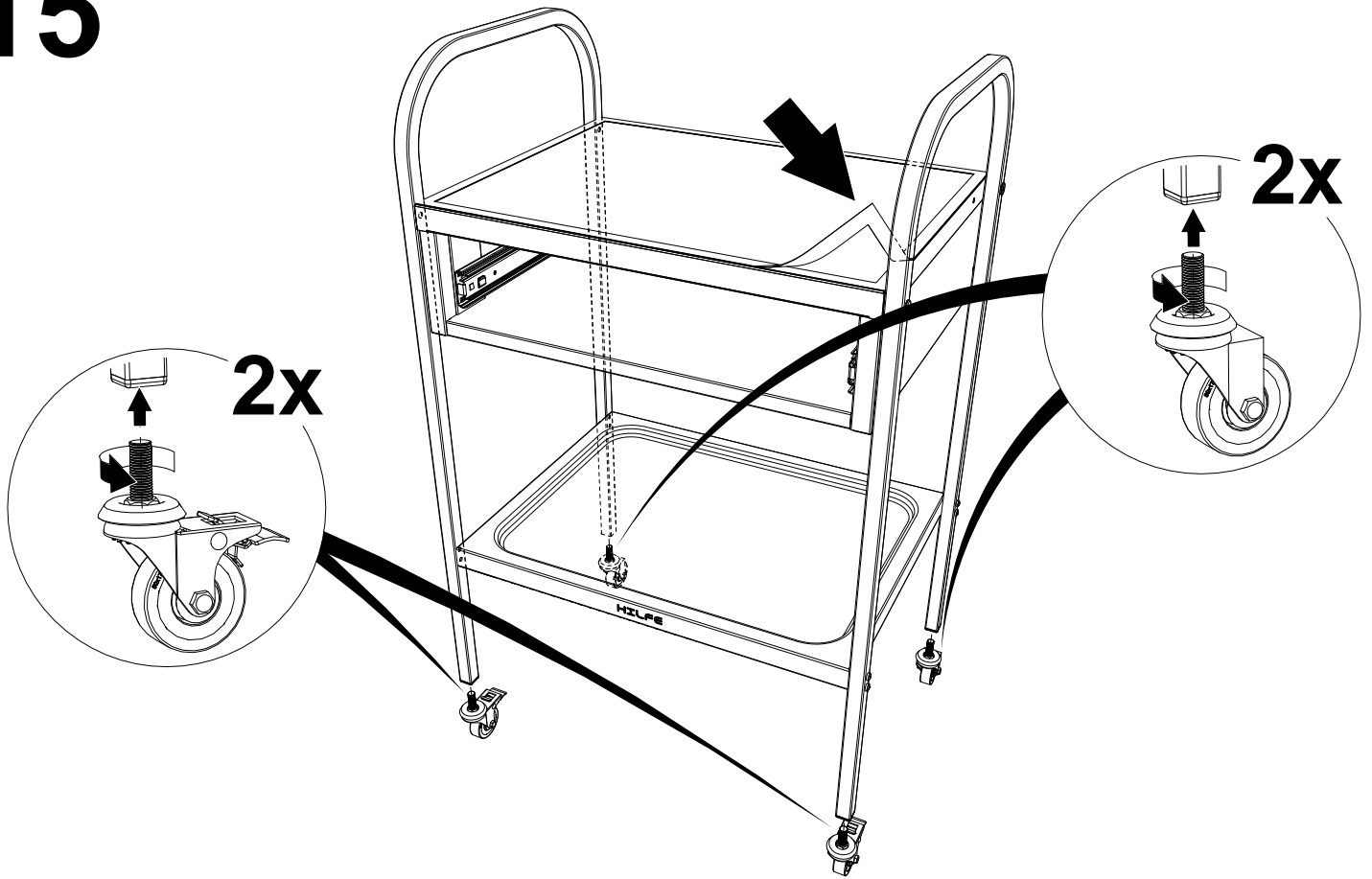


16

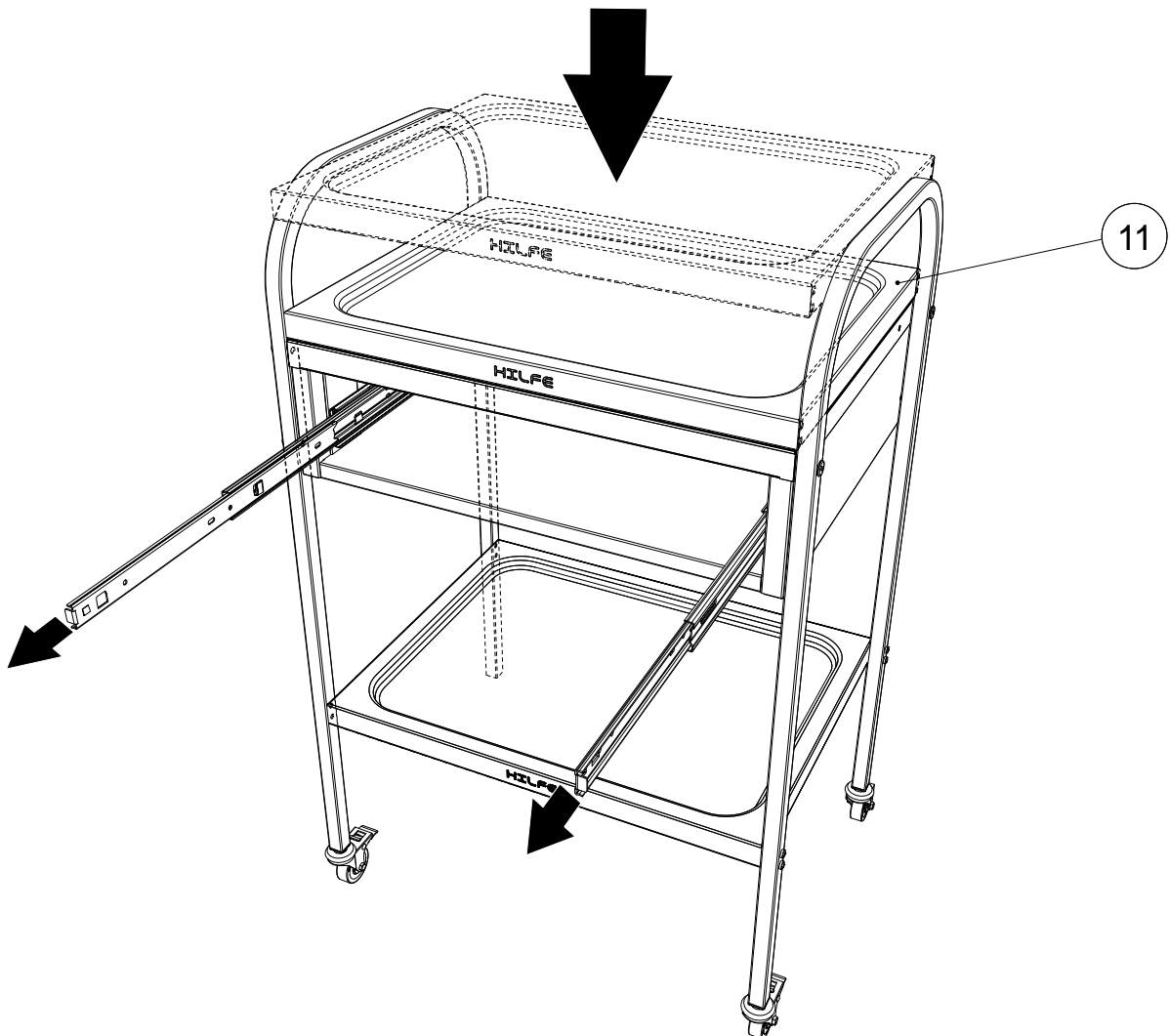

17

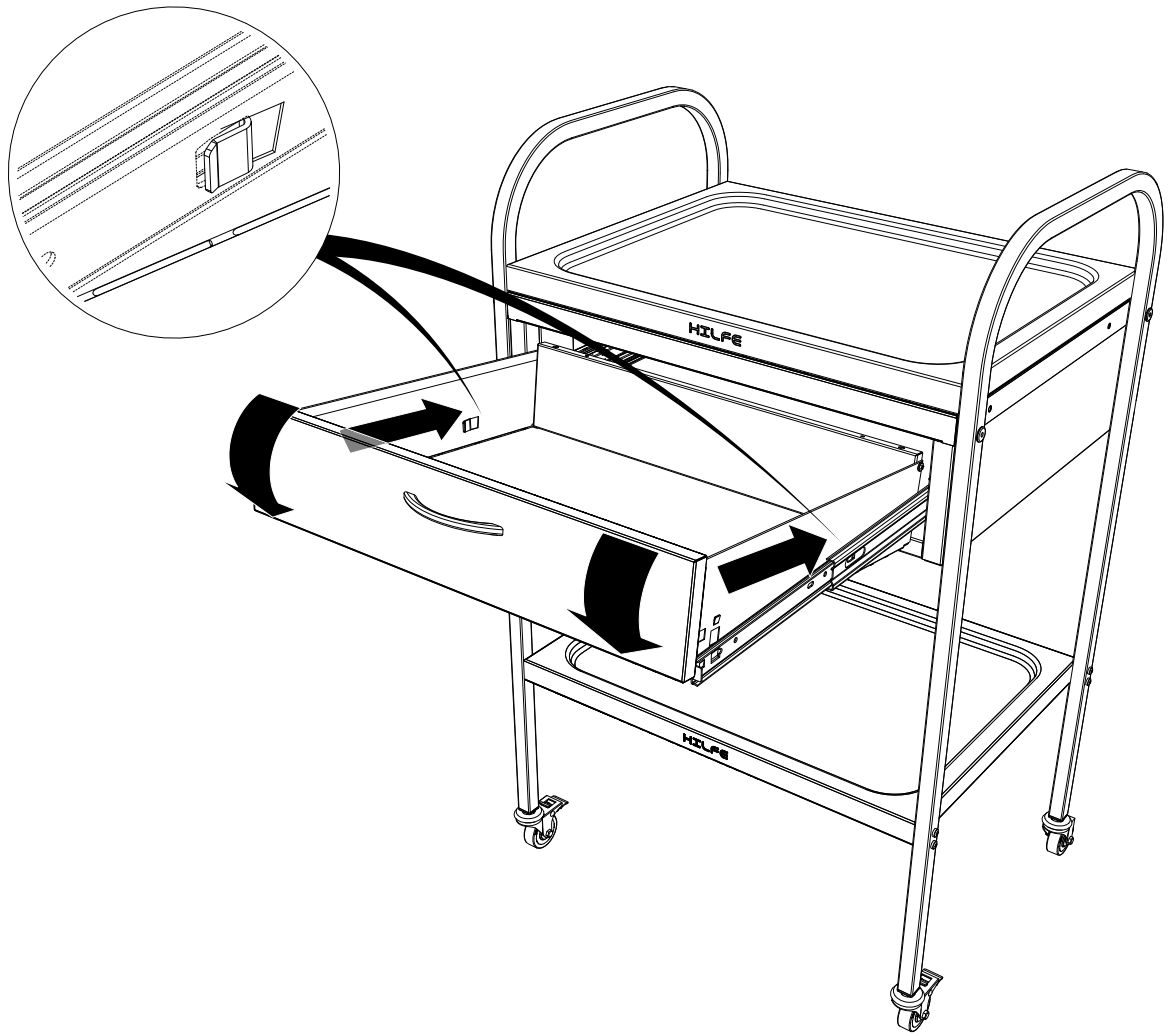

18

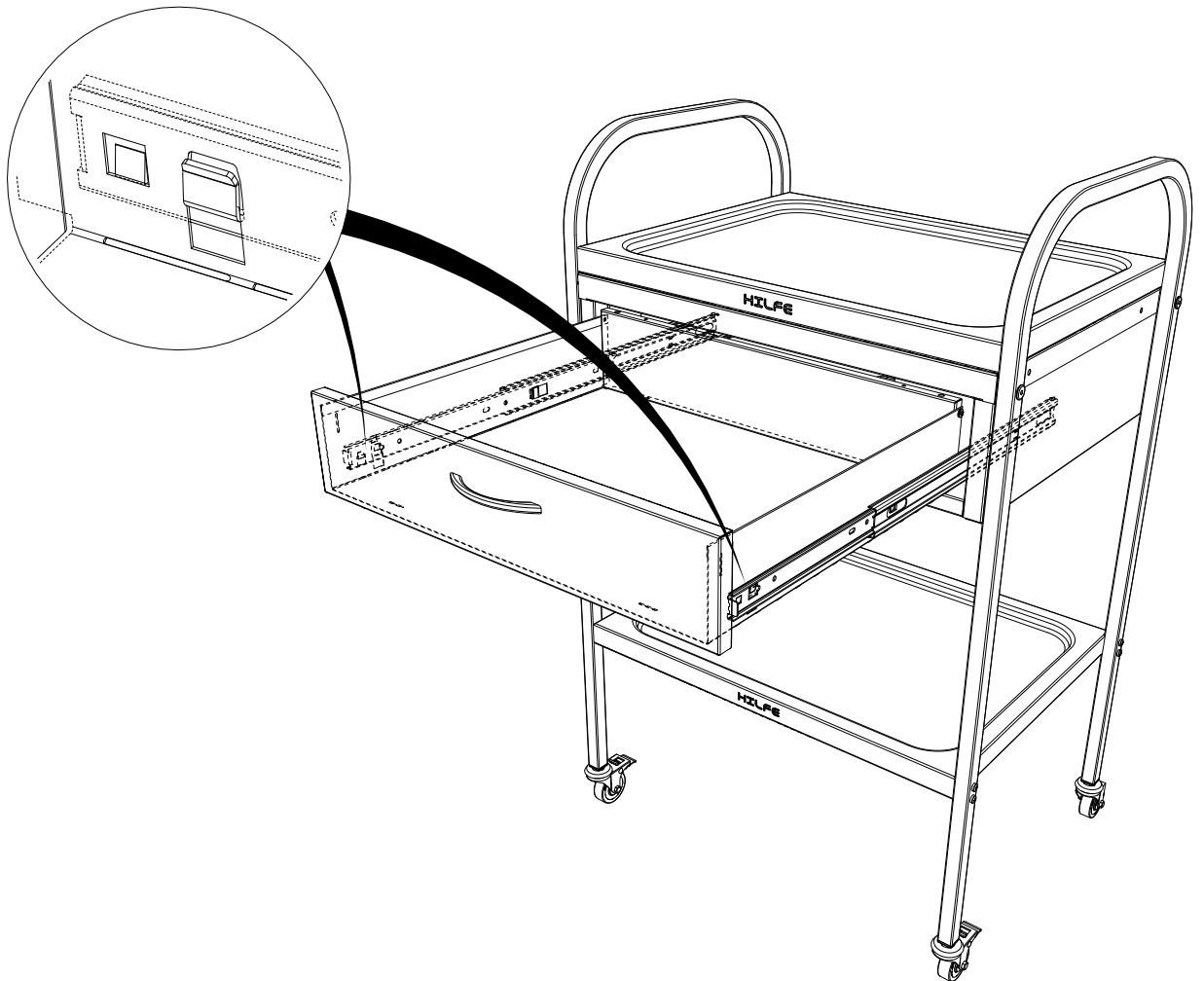

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику.

Допустимая распределенная нагрузка: на полку не более 15 кг, на ящик не более 15 кг.

Столы процедурные и манипуляционные серии МД могут эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Стол устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность. В случае необходимости передние ролики стопорятся посредством фиксаторов.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Уход за поверхностями выполненными из нержавеющей стали рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- обработать влажной губкой;
- распылить моющее средство для нержавеющей стали на основе нейтрального жидкого мыла и спирта, затем протереть насухо мягкой салфеткой;
- промыть водой и отполировать сухой салфеткой из микрофибры.

Категорически нельзя использовать:

- жесткие губки с металлическим напылением;
- металлические скребки, губки, оставляющие царапины;
- кварцевый песок;
- неорганические кислоты и щелочи;
- чистящие пасты с содержанием абразива и кислоты;
- средства для дезинфекции с содержанием хлора.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности салазок тонким слоем смазки.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Столы процедурные и манипуляционные можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

9. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.