

**Набор реанимационный для оказания
скорой медицинской помощи
НРСП-02-«МЕДПЛАНТ»**Руководство по эксплуатации
МПАГ.942431.037РЭ**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСР-02-«МЕДПЛАНТ» предназначен для оказания скорой медицинской реанимационной помощи.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы: скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстренной медицины; учреждения амбулаторной медицины, другие медицинский учреждения.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение Параметр	В сумке реанимационной СР-03	В сумке универсальной СМУ-2	В футляре-саквояже УПМ-Пм/2	В рюкзаке универсальном РМУ-04
Габаритные размеры, мм	(500x255x280)±50	(530x260x260)±50	(440x252x340)±50	(350x270x530)±50
Масса, кг	5,8	5,8	6,8	7,4

Средний срок службы:

- не менее 3-х лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10°C до +40°C;
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сумка реанимационная СР-03 / или Сумка универсальная СМУ-02 / или Футляр-саквояж УПМ-Пм/2 / или Рюкзак универсальный РМУ-04 – 1 шт;
2. Комплект вложений (согласно приложению) – 1 комп.;
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

6. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСР-02-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов.

Сумка универсальная СР-03

Имеет специальную конструкцию обеспечивающую защиту вложений при транспортировании и хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из синтетической ткани, в стенках сумки (в специальных карманах) находятся моющиеся съемные каркасные элементы их ПВХ-пластика и изолона ППЭ.

На внешней стороне крышки сумки расположен отдельный отсек (на молнии) с держателем для информационной вставки (номер бригады и т.п.) и карманом для бланков и других бумаг. По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток. Внутри сумки под крышкой расположен встроенный ампулярий для ампул разного размера (общим количеством 56 мест) и сетка для удобного расположения расходных материалов. На плечевом ремне имеется дополнительная пряжка для регулирования длины и накладка предохраняющая ремень от сминания и повышающая комфорт при переносе изделия.

Сумка медицинская СМУ-02

Изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани, дно сумки изготовлено из непромокаемого тентового материала, что обеспечивает хорошую влагоизоляцию. Для защиты вложений от механических повреждений в стенках сумки находятся моющиеся съемные каркасные элементы. Для размещения вложений сумка имеет 3 кармана, основной отсек и отсек для хранения документов.

На внешней стороне сумки расположен держатель для информационной вставки (номер бригады и т.п.) и эмблема красного креста.

По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток.

На плечевом ремне имеется дополнительная пряжка для регулирования длины и накладка предохраняющая ремень от сминания и повышающая комфорт при переносе изделия.

Футляр-саквояж УПМ-Пм/2

Адаптирован к данному набору. Футляр-саквояж изготовлен из тепло холодостойкого пищевого АВС пластика, имеет удобную ручку и замки, исключая возможность его открытия при переносе. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны. В створках расположены лотки для размещения вложений. Створки крепятся к корпусу надежными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра-саквояжа обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора (укладки).

На внешней поверхности футляра-саквояжа имеется держатель для информационной вставки (номер бригады и т.п.), эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток.

Футляр-саквояж надежно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается моющими средствами, поэтому особенно удобен для частого использования.

Рюкзак универсальный РМУ-04

Изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани. В стенках рюкзака находятся каркасные элементы. Часть корпуса рюкзака выполнена из специальной тентовой ткани для улучшения защиты вложений от влаги и загрязнений при работе на земле. С внешней стороны рюкзак имеет два больших кармана, внутри рюкзака находятся шесть съемных модульных отделений с прозрачной стенкой. Для удобства ношения рюкзака на спинке имеются широкие плечевые лямки, для ношения одной рукой рюкзак снабжен двумя пластиковыми ручками (на верхней части рюкзака и сбоку), также рюкзак можно носить на одном плече с помощью плечевого ремня. На внешней стороне рюкзака расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток, эмблема красного креста и держатель для информационной вставки (номер бригады и т.п.).

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С НАБОРОМ

Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором необходимые изделия должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в его состав.

Футляр-саквояж УПМ-Пм/2 имеет жесткий каркас, защищающий элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке набора и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов наборов и нарушению стерильности вложений.

Избегайте воздействие острых предметов на сумку при её использовании.

Чтобы исключить повреждение изделий, не нагружайте их более чем на 12 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с набором продлевает срок его службы.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте набор, если вы не имеете достаточной квалификации.

После окончания работы с пациентом не убирайте загрязненное имущество в отделения к другим изделиям и инструментам. Загрязненное имущество следует упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренный отсек. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и

инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении срока годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить.

ВНИМАНИЕ!

Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-ного моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в данном растворе, потереть с легким нажатием в прямом и обратном направлениях.

Сумка (рюкзак) самостоятельному ремонту не подлежит.

При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью ремонтного комплекта, входящего в состав футляра-саквояжа, как показано на Рис.1.

Состав ремонтного комплекта:

- 1) замок – 1 шт.; 2) тяга – 2 шт.; 3) втулка – 2 шт.; 4) шайба пружинная («гровер») 4x1 – 2 шт.;
- 5) винт М4х18 – 2 шт.; 5) гайка М4 – 2 шт.

обозначения на рисунке:

- 1 - винт;
- 2 – корпус укладки, внутренняя сторона
- 3 - тяга
- 4 - втулка
- 5 – пружинная шайба
- 6 - гайка

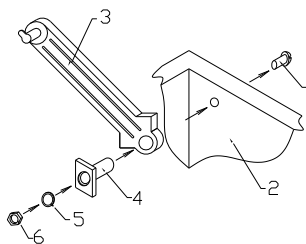


Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УПМ-Пм/2 с помощью ремонтного комплекта

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УХОД

Транспортирование набора может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 75% при 15 °C.

Наборы могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до 40°C и относительной влажности 60% при 20°C.

9. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой медицинской реанимационной помощи. Противопоказания, при правильном применении изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сумки (рюкзак) и футляры-саквояжи без вложений, не находившиеся в эксплуатации, утилизируются как медицинские отходы класса А согласно СанПиН 2.1.7.3684-21.

Сумки (рюкзак) и футляры-саквояжи без вложений, находившиеся в эксплуатации, утилизируются как медицинские отходы класса А согласно СанПиН 2.1.7.3684-21, после их обязательной дезинфекции по МУ 287-113.

Вложения набора (комплектующие) утилизируются согласно указаниям их инструкций по применению.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия при условии соблюдения рекомендаций по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Гарантийный срок службы укладки – 12 месяцев со дня продажи изделия (гарантия распространяется на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ»: сумки (рюкзаки) универсальные (реанимационные), футляр-саквояж. Гарантия не распространяется на вложения (см. Приложение) производства сторонних организаций.

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности вложения с наименьшим сроком хранения (при отсутствии срока хранения у изделия – по сроку годности), но не менее 6 месяцев.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318.

Телефон: 8(495)223-6016

E-mail: medplant@medplant.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-02-«МЕДПЛАНТ»:

Наименование	Артикул
В сумке реанимационной СР-03	
В сумке универсальной СМУ-02	
В футляре-саквояже УПМ-Пм/2	
В рюкзаке универсальном РМУ-04	

Соответствует ТУ 21.20.24-075-52777873-2023 и признан годным к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Приложение:

Перечень вложений, входящих в состав набора реанимационного для оказания скорой медицинской помощи НРСП-02-«МЕДПЛАНТ»

№	Наименование медицинского изделия	Количество, не менее
1	Аспиратор механический	1 шт.
2	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый	1 шт.
3	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой	1 шт.
4	Зонд желудочный (разных размеров)	2 шт.
5	Игла хирургическая	2 шт.
6	Иглодержатель	1 шт.
7	Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких взрослый (с возможностью подключения к источнику кислорода)	1 комп.
8	Комплект трубок ларингеальных, в том числе интубирующих (либо комплект масок ларингеальных, в том числе интубирующих, либо комбитьюб) для взрослых (не менее 2 шт., разных размеров)	1 комп.
9	Комплект трубок эндотрахеальных (не менее 3 шт., разных размеров)	1 комп.
10	Ларингоскоп с набором клинков разных типоразмеров (не менее 3 клинков) для взрослых	1 шт.
11	Комплект катетеров (зондов) аспирационных для дыхательных путей (не менее 3шт., разных размеров)	1 комп.
12	Набор для коникотомии и/или трахеостомии взрослый	1 набор
13	Переходник гибкий для интубационных трубок одноразовый	1 шт.
14	Роторасширитель	1 шт.
15	Скальпель стерильный одноразовый	1 шт.
16	Стиллет № 10	1 шт.
17	Стиллет № 6	1 шт.
18	Стиллет № 14	0...1 шт.
19	Троакарный дренажный катетер	1 шт.
20	Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса)	1 шт.
21	Фильтр дыхательный бактериовирусный	1 шт.
22	Шовный материал	1 уп.
23	Шприц 150 мл типа Жане	1 шт.
24	Языкодержатель	1 шт.
Прочие средства		
25	Воронка пластмассовая	2 шт.