

# ООО «ЭсДжиМедикал»

Российская Федерация, г. Иваново, улица проезд Красных Зорь 1а,

Тел: (495) 120-10-67

## Паспорт

на изделия с товарным знаком SGMedical.

### МАТРАЦ МЕДИЦИНСКИЙ БЕСПРУЖИННЫЙ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ ЧЕХЛОМ

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ, УЛУЧШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА, ПОВЫШЕНИЯ ЭСТЕТИЧНОСТИ И КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

#### Назначение изделия:

МАТРАЦ МЕДИЦИНСКИЙ БЕСПРУЖИННЫЙ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ ЧЕХЛОМ (ДАЛЕЕ ИЗДЕЛИЕ), ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАСТИЛА НА МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ ПОВЕРХ СЕТКИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРОВАТЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ, ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА, ДЛЯ СОЗДАНИЯ УДОБНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, НА КОТОРОЙ МОЖНО ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ, ЛЕЖАТЬ, СПАТЬ. МАТРАЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ЛЕЧЕБНЫХ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

#### Технические характеристики, маркировка и размеры изделия:

МАТРАЦ МЕДИЦИНСКИЙ БЕСПРУЖИННЫЙ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ ЧЕХЛОМ СОСТОИТ ИЗ:  
- ВНУТРЕННЕГО МЯГКОГО ОБЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА:

А) ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ (НПВ);

Б) ПЕНОПОЛИУРЕТАН ВТОРИЧНОГО ВСПЕНИВАНИЯ (НПВВ);

С ОДНОЙ ИЛИ ДВУХ СТОРОН КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ НАНЕСЕНЫ ПОПЕРЕЧНЫЕ И ПРОДОЛЬНЫЕ НАСЕЧКИ (ШТРОБИРОВАННЫЙ).

- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ЧЕХЛА.

Пример условного обозначения матраца: Матрац беспружинный с водонепроницаемым чехлом.

- с наполнителем из пенополиуретана эластичного, односекционный (табл. 1 графы А, В), длиной 2000 мм (таб.1 графы С, D), шириной 800 мм (таб.1 графы Е, F), высотой 100 мм (таб.1 графы G, H), с чехлом из кожзаменителя ПВХ (таб.1 графы I, J)

Таблица 1.

Количество секций		Длина мм		Ширина мм		Высота мм		Материал чехла	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	односекционный	1	1900	1	600	1	80	1	Кожзаменитель ПВХ
2	двухсекционный	2	2000	2	700	2	100	2	Синтетическая ткань с полиуретановой мембраной
3	трёхсекционный	3	1600	3	800	3	60	3	Синтетический трикотаж с полиуретановой мембраной
4	четырёхсекционный	4	1700	4	900	4	120		
5	двухсекционный штробированный	5	1800	5	850	5	140		
6	трёхсекционный штробированный	6	1850	6	950	6	150		
7	четырёхсекционный штробированный	7	1950	7	1000	7	200		
8	универсальный штробированный	8	1200	8	1200				

### **Правила ухода, хранения, транспортировки и эксплуатации изделия:**

1. ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УПАКОВКЕ В ЗАКРЫТОМ ТРАНСПОРТЕ (АВТОМОБИЛЬНОМ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ, ВОЗДУШНОМ ИЛИ ВОДНОМ) В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ПО УСЛОВИЕМ 2 ГОСТ15150-69, С УЧЁТОМ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ: ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ В ДИАПАЗОНЕ ОТ -50° С ДО +50° С .
2. ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ ТОЛЬКО В УПАКОВКЕ, В ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСЛОВИЯМ 2 ГОСТ 15150-69 ( ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДИАПАЗОНЕ ОТ -50° С ДО +50° С).
3. ИЗДЕЛИЕ, СОГЛАСНО ГОСТ 50444-92, ПРИГОДНО К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ +40° С ДО - 25° С И НОМИНАЛЬНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ОТ 70% (ПРИ +15°С) ДО 100% (ПРИ +25° С).
4. УТИЛИЗАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ПРОВОДИТЬ КАК ОТХОДЫ КЛАССА А ПО САНПИН 2.1.7.2790.
5. ИЗДЕЛИЕ УПАКОВАНО В ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ПЛЁНКУ (ПАКЕТ).
6. ЧЕХОЛ МАТРАЦА ОБЛАДАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ (ПОТА, МОЧИ) В СООТВЕТСТВИИ С МУ 25.1-001.
7. ДОПУСКАЕТСЯ ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА МЯГКОЙ САЛФЕТКОЙ ИЛИ ЩЁТКОЙ, СМОЧЕННОЙ В НЕЙТРАЛЬНЫХ МЫЛЬНЫХ РАСТВОРАХ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ И ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ.
8. ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА И СТИРКА ЧЕХЛОВ ПО ГОСТ 25652-83. ЧЕХОЛ МАТРАЦА ДОПУСКАЕТ СТИРКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЫТОВЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ.
9. ДЕЗИНФЕКЦИЯ МАТРАЦА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО МУ-287-113 ЛЮБЫМИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ И МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ МЕТОДОМ ОРОШЕНИЯ ИЛИ ПРОТИРАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБРАБОТКОЙ В ДЕЗ. КАМЕРЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ БОЛЕЕ 90° С .

### **Комплект поставки:**

1. УПАКОВКА 1 ШТ
2. ИЗДЕЛИЕ 1 ШТ
3. ПАСПОРТ 1 ШТ

### **Гарантийные обязательства:**

1. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ ПОКУПАТЕЛЮ СОХРАНЕНИЕ ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ПРАВИЛ УХОДА.
2. ЗА ИЗДЕЛИЯ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
3. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ИСЧИСЛЯЕТСЯ СО ДНЯ ПРОДАЖИ. ЕСЛИ ДЕНЬ ПРОДАЖИ УСТАНОВИТЬ НЕВОЗМОЖНО, ТО ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ИСЧИСЛЯЕТСЯ СО ДНЯ ВЫПУСКА.

### **Сертификат соответствия:**

№ РОСС RU.МН33.Н00030 с 08.08.2022г.

РУ № РЗН 2016/5212 от 07.09.2022г

Изготовлено в соответствии с ТУ 9396-001-09922741-2014.

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом

Код ОКПД-2 31.03.12.140

Код ТН ВЭД 94042910

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ



МОЧЕГОВА Е.А.



ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА: 2023 Г